

behandla BPH

Om du är en av miljontals män som är missnöjd med nuvarande behandlingsalternativ för BPH, till exempel läkemedel eller kirurgi, är Rezūm-behandling med vattenånga ett säkert och effektivt nytt alternativ för att omvandla din upplevelse av BPH-behandling.

ett enkelt mål

Vårt företag är byggt på respekt, passion och motivation. Min far dog av prostatacancer 1995. Jag är personligen och passionerat engagerad i att hitta effektiva behandlingar för alla prostatarelaterade sjukdomar. Rezūm-systemet utformades för att hedra och fira min fars minne.



Michael Hoey
Co-Founder & Chief Technology Officer

rezūm®
water vapor therapy

www.rezum.com

Rezūm-ingreppet ordinerar av din läkare. Tala med din läkare för att se om det är rätt för dig. Din läkare bör diskutera alla potentiella fördelar och begränsningar med dig. Även om många patienter har haft nytta av Rezūm-ingreppet, kan resultaten variera. Ytterligare information om fördelarna och riskerna med Rezūm-ingreppet finns på www.rezum.com.

©2017 NxThera, Inc. Med ensamrätt. Rezūm är ett registrerat varumärke som tillhör NxThera, Inc. 3171-001EN Rev A (09/17)

den nya vågen inom BPH- behandling

rezūm®
water vapor therapy

vad är BPH?

Benign
prostatahyperplasi
(BPH)

är en förstoring av prostatakörteln, som påverkar ca 50 % av män i åldrarna 51 och 60 år, och upp till 90 % av män över 80 år.¹

Denna förstoring kan komprimera urinröret, minska flödet av urin från blåsan, och ibland blockera den helt.

Symptomen av BPH inkluderar:

- Urineringsfrekvens
- Oregelbundet flöde
- Trängning
- Svag stråle
- Krystning
- Gå upp på natten för att urinera

¹ Barry M, Roehrborn C. Management of benign prostatic hyperplasia. *Annu Rev Med*. 1997;48:177-89.

SE SKILLNADEN


Rezüm använder den naturliga energin som lagras i vattenånga. Det är en säker och effektiv behandling² som är tillgänglig för att lindra symptom som förknippas med benign prostatahyperplasi, eller BPH.

Under var 9:e sekunds behandling frigörs steril vattenånga genom den prostatavävnad som inriktas. När ångan återgår till vatten, frigörs all den lagrade energin, vilket gör att cellerna dör.

Över tiden avlägsnar kroppens naturliga läkningsprocess de döda cellerna, och krymper prostatan. När den extra vävnaden avlägsnats öppnas urinröret, vilket minskar BPH-symptomen.

De flesta patienter börjar uppleva symptomlindring inom så snart som två veckor, och maximal nytta kommer inträffa inom tre månader.

² Roehrborn CG, Gange SN, Gittelman MC, et al. Convective thermal therapy: Durable 2-year results of randomized controlled and prospective crossover studies for treatment of lower urinary tract symptoms due to benign prostatic hyperplasia. *J Urol.* 2017 Jun;197(6):1507-16.

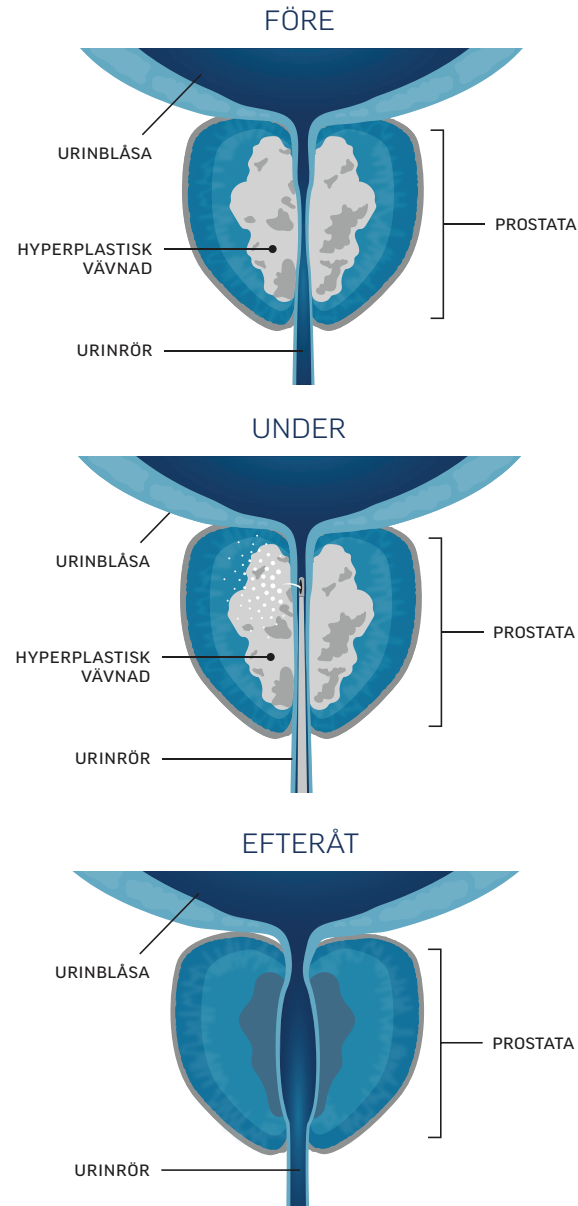

Antalet behandlingar med vattenånga varierar, beroende på storleken på prostatan. Ingreppet sker under ett besök och inkluderar vanligtvis mellan 2 och 8 behandlingar med ånga. Dessutom är bilderna ovan avsedda att visa hur ingreppet fungerar, inte att ge en exakt representation av patientresultat.

Fråga din läkare
om Rezüm är
rätt för dig.

3 enkla steg

1. INNAN DITT INGREPP

- Din läkare kan stoppa antikoagulantia eller blodförtunnande medel ett par dagar till en vecka före ditt ingrepp.
- Antibiotika kan förskrivas.
- Din läkare kommer att diskutera eventuella smärtstillande medel som kommer att användas.

2. DAGEN FÖR INGREPPET

- Den faktiska proceduren tar bara några minuter; men planera att spendera ca en halv dag för hela besöket.
- Du får smärtlindrande medel, som ordinerats av din läkare för ingreppet.
- Planerar att ha en chaufför för besöket såvida inte din läkare säger att du kan köra hem själv.

3. ÅTERUPPTA DITT LIV

- Efter proceduren ska du fortsätta att orala antibiotika i 3 till 5 dagar, enligt vad din läkare förskrivit.
- Din läkare kan rekommendera en kateter i några dagar för att underlätta urinering under läkningen.
- Undvik aktiviteter som kan irritera din prostata. Rådfråga din läkare för specifika rekommendationer.
- Om du upplever obehag:
 - Ta ett svagt smärtlindrande medel, enligt vad som rekommenderas av din läkare.
 - Prova med ett varmt bad eller att sitta på en varm-vattenflaska.
 - Överväg att tillfälligt utesluta koffein, choklad och alkohol från din kost.

Inom några dagar kommer du att kunna återuppta normala aktiviteter och kommer att uppleva en märkbar symptomförbättring inom så snart som två veckor.²

Ytterligare information finns på www.rezum.com