


### Steg 1:

Håll FIX8 dispensern med den distala änden nedåt i en ca 45° vinkel. Lyft det blå locket helt upp i pilens riktning, vilket krossar ampullen med lim – vänta därefter i 5 sekunder.

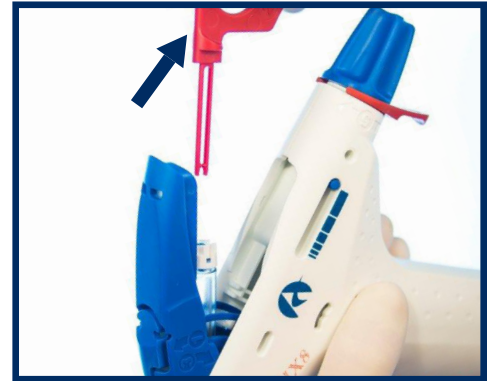


### Steg 2:

Håll nu FIX8 dispensern så att handtaget ligger vertikalt och den distala spetsen pekande lodrätt nedåt, medans den röda fingerringen under det blå locket dras ut i en mycket långsam rörelse – det är viktigt att denna rörelse varar ca 20 sekunder. När den röda fingerringen är helt utdragen frigörs den ur dispensern och kan slängas.



### Steg 3:

Nu stängs det blå locket i pilens riktning – det ska låsas fast mot handtaget och det hörs ett klick när locket är på plats.

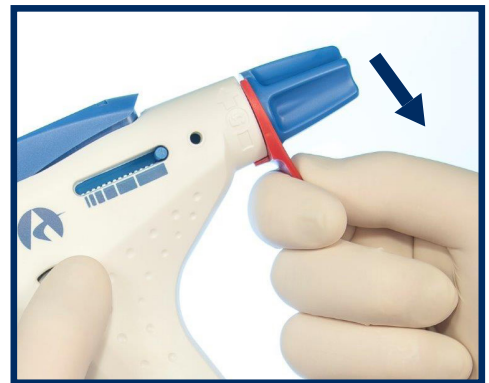

### Steg 4:

Ta nu bort det röda "primingläset" på dispensern och släng det



### Steg 5:

Den distala änden på dispensern hålls nedåt över en plastbricka eller liknande och den blå rotationsknappen roteras nu i klockriktning (pilens riktning) – det är viktigt, att man inte håller på avtryckaren, som automatisk blir utlöst.



### Steg 6:

Den distala änden hålls stadigt nedåt över en plastbricka eller liknande och avtryckaren aktiveras 2 till 3 gånger tills en dropp lim ses vid spetsen. FIX8 är nu klar att användas.