

Vad händer efteråt?

I de flesta fall skrivs patienten ut från mottagningen eller kliniken samma dag som behandlingen.³ Vissa kvinnor kan känna magkramp under ungefär en dag efter ingreppet.³ Din läkare kan rekommendera ett smärtstillande medel som lindring. Efter behandlingen kan du även uppleva vaginala blödningar och flytningar vilket är en normal del av livmoderns läkeprocess.³ Om du är orolig, kontakta din läkare.

Vanliga frågor:

Är ballongablation effektivt?

I färskast studier angav de kvinnor som behandlats med LiNA Librata™ att de var mycket nöjda med proceduren, att de upplevde en avsevärd minskning av blodförlust vid menstruation och bättre hälsorelaterad livskvalitet.^{4,5}

Är LiNA Librata™ rätt val för mig?

Kvinnor som lider av svåra menstruationer och som inte önskar få fler barn är kandidater till proceduren LiNA Librata™. Detta behandlingsval beror dock på ett antal olika faktorer. Av detta skäl är det viktigt att du rådfrågar din läkare och att ni tillsammans bestämmer vilken behandling som är lämpligast för dig.

Behöver jag fortfarande använda preventivmedel?

Ja, efter alla endometrieablationsingreppet finns en liten sannolikhet till graviditet. Det är viktigt att lämpliga preventiva åtgärder fortsätter efter ingreppet. Endometrieablation bör inte användas om du vill bli gravid. Graviditet efter endometrieablation kan vara farliga för både dig och fostret.

Om du har ytterligare frågor kan du rådfråga din läkare.

"Jag är mycket nöjd med resultatet av ingreppet med LiNA Librata™ för min livmoderablation. Ingreppet var mycket smidigt och tog inte alls lång tid."

*– Patient som behandlats med
LiNA Librata™*

Ta tillbaka kontrollen över
**svår
menstruation**



LiNA Librata™

LiNA Librata™

¹ "Heavy Menstrual Bleeding." ACOG, juni 2016, www.acog.org/womens-health/faqs/heavy-menstrual-bleeding.

² LiNA Librata™ Instructions for Use FV0151.

³ "Endometrial Ablation." Royal College of Obstetricians & Gynaecologists, 22 Oct. 2015, www.rcog.org.uk/en/patients/patient-leaflets/endometrial-ablation/.

⁴ Guyer, Christopher. "Clinical evaluation of the Librata endometrial ablation device in an outpatient setting." ESGE Annual Congress 2018. Messe Wien Exhibition & Congress Center, Vienna, Austria. Oral Presentation.

⁵ Fortin, Claude. "Performance and effectiveness of the Librata endometrial ablation system." CanSAGE Annual Meeting 2020. Virtual. Poster Presentation.

LiNA är ett registrerat varumärke för LiNA Medical inom EU, i USA och i Kina.

©2021 LiNA Medical ApS. Med ensamrätt.

LiNA Medical ApS

Formervangen 5, DK-2600 Glostrup, Denmark | Tel.: +45 43 29 66 66, Fax: +45 43 29 66 99
info@lina-medical.com www.lina-medical.com CVR : 10054974

LiNA Librata Patient brochure / 2021-06-BV01548 sv

Gör menstruationerna tolerabla igen med
denna snabba ~2 minuters värmebehandling



Innovation inom gynekologi

Vad är kraftiga blödningar?

Uppskattningsvis söker 1 av 3 kvinnor behandling av svåra menstruationsblödningar.¹ Svåra menstruationer kan ofta vara en stor störning i en kvinnas vardag och kräver frekventa byten av binda eller tampong. Det leder till begränsad aktivitet och behov av att hantera kläder för att undvika pinsamheter.

Symtom

En normal menstruationsperiod varar 5 till 7 dagar, men om du lider av kraftig menstruationsblödning kan du uppleva något av eller alla följande symtom:

- Menstruationen varar längre än 7 dagar
- Frekvent byte av sanitetsartiklar som blir blöta inom några timmar
- Rädsla och ångest över möjliga blödningsolyckor
- Menstruationsflöde som innefattar stora blodklumpar
- Allvarlig smärta eller kramp
- Utmattning eller trötthet

Behandlingar

Det finns flera alternativ för behandling av svåra menstruationer. Vilken behandling som är bäst för dig beror på ett antal olika faktorer: din hälsa, ditt familjeliv, intensiteten i menstruationsblödningarna och hur de påverkar ditt liv. Beroende på dessa faktorer sträcker sig alternativen från läkemedelsbehandling till kirurgiska ingrepp som kan vara antingen tillfälliga eller permanenta.

En av behandlingsmetoderna är en endometrieablation med **LiNA Librata™**, ett minimalt invasivt ingrepp. Diskutera med din läkare om LiNA Librata™ är ett lämpligt alternativ för dig.

Få tillbaka kontrollen med LiNA Librata™

LiNA Librata™ är ett endometrieablationsingrepp som hjälper till att minska eller till och med stoppa dina menstruationsblödningar. Under en snabb ~2 minuters värmebehandling, applicerar LiNA Librata™ värme på livmoderns inre hinna som orsakar blödningen.² Det är ett ingrepp som hjälper dig att hantera dina kraftiga blödningar på ett effektivt sätt.


Fördelar med LiNA Librata™:

- Värmebehandlingstid på ~2 minuter
- Inga snitt
- Ingen sjukhusinläggning (du kan vanligtvis åka hem direkt efter ingreppet)
- Enkelt ingrepp (få steg)



Vad händer innan ingreppet?


Innan ingreppet rådgör läkaren vilken typ av bedövning som ska användas (dvs lokal, intravenös, generell). Du kan få medicin utskriven för att göra ingreppet mer komfortabelt.

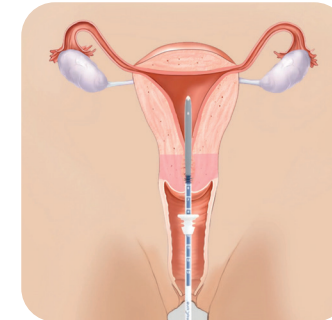

Hur fungerar det?


Steg 1 - Införande

Din läkare för in en smal och mjuk ballongkateter genom livmoderhalsen och in i livmodern. Inget snitt krävs.

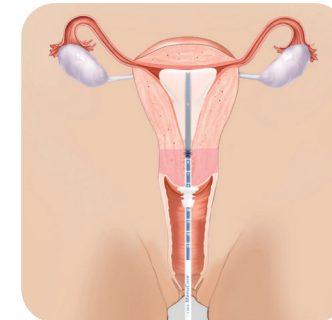

Steg 2 - Behandling

Ballongen blåses upp lätt med en varm vätska för att fylla upp livmodern. Vätskan cirkuleras i ~2 minuter för att behandla livmoderns hinna.

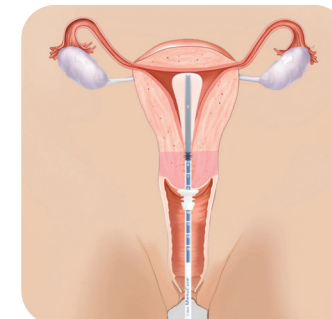

Steg 3 - Borttagning

Efter behandlingen töms ballongkatetern och tas ut från livmodern.

Vad händer under ingreppet?

I vissa fall kan din läkare använda lokalbedövning och kan vidga livmoderhalsen för att kunna föra in instrumentet. Du kan känna menstruationsliknande kramp under ingreppet.